


# קטלוג חבישות

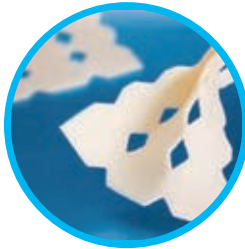

# תוכן עניינים

3.....	קווים מנחים לשימוש בחבישות בהתאם לשלבי הפצע.....
5.....	<b>HydroClean® Advance</b> חבישת לחלוח והטרייה.....
8.....	<b>Atrauman® Ag</b> חבישת יוני כסף.....
9.....	<b>Sorbalgon®</b> חבישת אצות ים.....
10.....	<b>Hydrocoll®</b> חבישת הידרוקולואיד.....
11.....	<b>Hydrosorb®</b> חבישת ג'ל.....
12.....	<b>Hydrotac®</b> חבישת ספוג עם הידרוג'ל.....
13.....	<b>PermaFoam®</b> חבישת ספוג.....
14.....	<b>Proximel®</b> חבישת ספוג עם סיליקון.....
15.....	<b>Proximel Ag®</b> חבישת ספוג עם סיליקון ויוני כסף.....
16.....	<b>Biopad®</b> חבישת קולגן.....
18.....	<b>Grassolind®</b> חבישת גזה שומנית.....
20.....	<b>Hydrofilm®</b> חבישת הגנה וקיבוע.....
21.....	<b>Cosmopor E®</b> פד דביק להגנה וקיבוע.....
22.....	<b>Omnifix E®</b> תחבושת דביקה לקיבוע חבישות וצר"פ אחר.....
23.....	<b>Varolast® plus</b> תחבושת לחץ דביקה.....
24.....	<b>Safix® Plus</b> אגד גבס מהיר התייבשות.....
25.....	<b>Omnitape®</b> תחבושת דביקה לקיבוע מפרקים.....
26.....	<b>Omplast®</b> טייפ קיבוע.....
27.....	<b>Peha-haft® Latex Free</b> תחבושת קיבוע אלסטית.....
29.....	<b>Dermaden</b> קרם ייחודי, לטיפול בפצעים/פגעי עור וכוויות.....

\* כל האמור בחוברת זו הינו לצורכי מידע כללי בלבד, ואינו מהווה תחליף לעיון בעלון ההדרכה למשתמש הנמצא בארזות החבישה, ובהתאם להנחיות הרופא המטפל.

**\* אין להשתמש במקרה של רגישות או אלרגיה לאחד ממרכיבי החבישה**



## אודות

כמיטק פועלת לשיפור איכות חייהם של מאות אלפי ישראלים זה למעלה מ- 30 שנה. אנו עוסקים בייבוא ושיווק של ציוד רפואי, לצד טכנולוגיות חדשניות בתחומי הרפואה והבריאות.

אנו שואפים למצוינות בכל מעשינו ופועלים רבות על מנת לספק לקהל לקוחותינו פתרונות רפואיים ממגוון רחב של תחומים. אנו עוקבים באופן מתמיד אחר פיתוחים טכנולוגיים ודואגים לייבא לארץ מוצרים איכותיים של חברות מובילות מהעולם בתחום הציוד רפואי, בהן חברת, Hartmann, KCI, Medicon, Meyra, ועוד. Burmier, ועוד.

על מנת לספק ללקוחותינו שירות בלתי מתפשר, כמיטק מונה למעלה מ- 70 אנשי מקצוע מתחומי הסייעוד, שיקום, אורתופדיה, רפואה ומעבדות. בזכות מערך הלוגיסטיקה וההפצה שלנו, עשרות אלפי לקוחות נהנים מדי חודש ממוצרים שמגיעים עד לפתח ביתם.

עם לקוחותינו נמנים גם עשרות גופים מוסדיים ופרטיים כגון: משרד הביטחון, משרד הבריאות, ביטוח לאומי, קופות החולים, בתי החולים, מוסדות סיעודיים ושיקומיים, בתי אבות, עמותות סיוע ועזרה ומפעלי תרופות ומזון.

## איכות וחדשנות

לחברת כמיטק טכנולוגיות חדשניות ומוצרי חבישה מתקדמים בתחום ריפוי ומניעת פצעים קשיי ריפוי המעניקים את הפתרונות הטובים בתחום, תוך שימת דגש על איכות. אנו הנציגים הבלעדיים של החברות הבינלאומיות Hartmann ו- KCI, אשר מתמחות בייצור הטכנולוגיות המתקדמות בעולם בתחום הטיפול בפצעים.










חברת Hartmann מוכרת כמובילה עולמית עם ותק וניסיון של 200 שנה. במסגרת מימוש החזון שלה, היא חותרת לשיפור מתמיד ולמציאת פתרונות מתקדמים, יעילים ומשפרי איכות חיים בתחום החבישה הרפואיות, חטיו, ניטור רפואי אישי ועוד. הפיתוחים הטכנולוגיים של העשור האחרונות מיצבו את Hartmann כמובילה עולמית בתחום החבישה הרפואית. וכיום היא מעמידה לרשות לקוחותיה, מגוון עשיר וחדשני של פתרונות לטיפול בפצעים.

## שירות טיפול אישי ומקצועי

כמיטק מעמידה לרשות מטופליה צוות אחים ואחיות מוסמכים, המתמחים בטיפול ובריפוי פצעים בבית הלקוח או במוסד רפואי, בהתאם להפניית רופא. צוות האחים והאחיות שלנו עברו הכשרה מיוחדת בתחום הטיפול בפצעים קשיי ריפוי, בארץ ובח"ל.

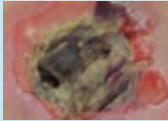

# קווים מנחים לשימוש בחבישות בהתאם לשלבי הפצע

שלב האפיתליזציה	שלב הגרנולציה	שלב הניקוי		
		פיברין	זיהום <sup>2</sup>	נמק
 <p><b>עור רגיש</b> Hydrosorb Hydrotul<sup>1</sup> HydroTac Biopad Grassolind Dermaden</p> <p><b>עור רגיל</b> Hydrocoll thin Hydrosorb comfort Hydrofilm (ללא הפרשה) Hydrotul<sup>1</sup> HydroTac HydroTac comfort Biopad Grassolind Dermaden</p>	 <p><b>עור רגיש</b> Hydrosorb Hydrotul Biopad HydroTac</p> <p><b>עור רגיל</b> Hydrocoll Biopad HydroTac HydroTac Comfort Proximel</p>	 <p><b>כל סוגי העור</b> Hydroclean Advance</p>	 <p><b>כל סוגי העור</b> Hydroclean Advance Atrauman Ag<sup>1</sup> Proximel Ag Proximel</p>	 <p><b>כל סוגי העור</b> Hydroclean Advance (אם יש צורך, בשילוב עם Atrauman Ag)</p>
<p>ספיגה הגנה וקיבוע</p>				
<p><b>Hydrofilm (Plus)</b> חבישה משנית דביקה</p> <p><b>Cosmopor E</b> פד דביק להגנה וקיבוע</p> <p><b>Peha-haft LF</b> תחבושת קיבוע אלסטית</p> <p><b>Omnifix E</b> תחבושת דביקה לקיבוע חבישות וציוד רפואי אחר</p> <p><b>Omnitape</b> תחבושת דביקה לקיבוע מפרקים</p> <p><b>Varolast®Plus</b> תחבושת לחץ דביקה</p> <p><b>Omniplast®</b> טיפ קיבוע</p> <p><b>Safix®Plus</b> אגד בגס מהיר התייבשות</p>				

-  **Hydroclean Advance**  
חבישת הרטבות ללחלוח והטרייה
-  **Atrauman Ag**  
חבישת כסף
-  **Sorbalgon**  
חבישת אצות ים
-  **Sorbalgon T**  
חבישת אצות ים למחילות
-  **Hydrocoll**  
חבישת הידרוקולואיד
-  **Hydrocoll Thin**  
חבישת הידרוקולואיד דקה
-  **Hydrocoll Sacrum**  
חבישת הידרוקולואיד לעצם הזנב
-  **Hydrocoll Concave**  
חבישת הידרוקולואיד למפרקים
-  **Hydrosorb (Comfort)**  
חבישת ג'ל הידרופילית
-  **HydroTac (Comfort)**  
חבישת ספוג עם ג'ל
-  **PermaFoam (Comfort)**  
חבישת ספוג
-  **PermaFoam Sacral**  
חבישת ספוג לעצם הזנב
-  **PermaFoam Concave**  
חבישת ספוג למפרקים
-  **PermaFoam Cavity**  
חבישת ספוג למחילות
-  **PermaFoam Tracheostomy**  
חבישת ספוג לאחר ניקוב הטרכאה
-  **Proximel**  
חבישת ספוג עם סיליקון
-  **Proximel Ag**  
חבישת ספוג עם סיליקון יוני כסף
-  **Biopad**  
חבישת קולגן
-  **Hydrotul**  
חבישת רשת הידרוקולואידית
-  **Grassolind**  
חבישת גזה שומנית לא דביקה
-  **Dermaden**  
קרם לטיפול בפצעים

1. חבישה ראשונית בשילוב עם חבישה סופגת.  
2. טיפול באמצעות חבישות בפצעים מזוהמים מותר רק תחת פיקוח רפואי.

HydroTherapy  
Efficacy. And Simplicity.

Cleanses  
& debrides!

NEW!  
And only from  
HARTMANN

Efficient wound healing begins  
with effective wound cleansing.

HydroClean<sup>®</sup> advance



# HydroClean<sup>®</sup> Advance

חבישת לחלוח והטרייה

## מרכיבי החבישה

- פוליאקרילט - (SAP) Super Absorbent Polyacrilate
- תמיסת רינגר
- חומר אנטיביוטיקטריאלי - PolyHexaMethylene Biguanide
- כיסוי מפוליפרופילן ורצועות סיליקון למניעת התייבשות והדבקות לפצע

## מנגנון פעולה

- ניקוי באמצעות ספיחת חיידיקים, הפרשות ואגזים ה-MMP
- ניקוי ולחלוח על ידי תמיסת הרינגר המכילה מלחים החיוניים לריפוי הפצע
- מניעת התרבות חיידיקים בתוך החבישה באמצעות ה-PHMB
- השריית סביבה חומצית ( $pH > 7$ ) שאינה ידידותית לחיידיקים רבים

## הוראות שימוש

- החלף את החבישה בתום 3 ימי שימוש, לכל היותר
  - הגן על שולי הפצע באמצעות משחה למניעת מסרציה
  - הנח את החבישה כך שצידה החלק יפנה כלפי מיטת הפצע ואילו צידה המפוספס יפנה כלפי מעלה
  - קבע את החבישה באמצעות חבישה משנית כגון Peha-haft LF או Omnifix E, Cosmopor
  - **אל תגזרו את החבישה**
- יתרונות**
- ניקוי באמצעות תמיסת רינגר
  - אספקת לחות עדינה וקבועה למיטת הפצע
  - ספיחת חיידיקים והפרשות מן הפצע
  - האצת יצירת גרנולציה ואפיתליזציה
  - החלפה ללא כאב וטראומה - החבישה אינה נדבקת לפצע
  - טיפול אידיאלי לפצעים מעורבים
  - הפחתת הסיכון לזיהום חוזר
  - החלפה אחת ל-72 שעות - חסכון בזמן ועלויות

מק"ט					תאור פריט			
ש"ר	לאומית	כללית	מכבי	מאוחדת	יצרן	מס' יח.	מידות	פריט
3100217424	66943		93808	66943	609768	10	7.5 x 7.5 ס"מ	
3100217431	66944		93809	66944	609772	10	10 x 10 ס"מ	
3100217403	66934		93805	66934	609762	10	4 ס"מ (קוטר)	HydroClean <sup>®</sup> Advance
3100217417	66942		93807	66942	609766	10	5.5 ס"מ (קוטר)	
3100217410			93806	66941	609764	10	4 x 8 ס"מ (אובלי)	





# Atrauman® Ag

חבישת יוני כסף

## מרכיבי החבישה

- אריג משי דק
- יוני כסף
- טריגליצרידים

## מנגנון פעולה

- שפעול בסביבה לחה
- פגיעה במנגנון החלוקה של החיידק על ידי הצמדות יוני הכסף לממברנה שלו

## הוראות שימוש

- גזור את החבישה בהתאם לגודל הפצע
- החלף את החבישה אחת ל-3-4 ימים
- קבע את החבישה באמצעות חבישה משנית כגון Peha-haft LF או Omnifix E, Cosmopor
- **אל תשתמש בחבישה עם חומר שומני המכיל פראפין**

## יתרונות

- מגוון שילובים אפשריים עם חבישות נוספות, בהתאם לסוג הפצע
- יחס עלות - תועלת גבוה
- החלפה בתדירות נמוכה
- התאמה אידיאלית לפצעים מעורבים
- שמירה על הרקמה הבריאה והגנה מפני מסרציה
- החבישה ניתנת לגזירה

## התוויות

- פצעים מזוהמים
- מניעת זיהומים

מק"ט					תאור פריט			
שאל	לאומית	כללית	מכבי	מאוחדת	יצרן	מס' יח.	מידות	פריט
3109903284					499571	10	5.5 ס"מ	Atrauman® Ag
	12536		12536		499573	10	10x10 ס"מ	
3109903291	12537		12537		499575	10	10x20 ס"מ	



הדור הבא של V.A.C.® THERAPY שני טיפולים במכשיר אחד



# Hydrocoll®

## חבישת הידרוקולואיד

### מרכיבי החבישה

- חלקיקי הידרוקולואיד
- שכבת פוליאוריטן

### מנגנון פעולה

- הפיכה לג'ל במגע עם הפרשות
- ספיחת חלקיקי תאים מתים והפרשות לתוך הג'ל
- אספקת לחות למיטת הפצע
- מניעת כניסת חיידקים לפצע

### הוראות שימוש

- גזור את החבישה כך ששוליה יהיו גדולים בכ-1-2 ס"מ משולי הפצע
- הדבק את החבישה על פני כל הפצע
- החלף את החבישה אחת ל-3-5 ימים או כאשר החבישה ספוגה בהפרשות

### יתרונות

- גמישות רבה
- שקיפות למחצה
- עוביים שונים
- מעבר לחות לתוך הפצע
- עידוד הטרייה ושמירה על סביבה לחה
- תדירות החלפה נמוכה
- החבישה ניתנת לגזירה

### התוויות

- פצעים אקוטיים וכרוניים בשלב הגרונולציה
- פצעים מפרישים בכמות קלה עד בינונית
- פצעי לחץ וכוויות עד דרגה שניה
- שפשופים והשטחת צלקות

### התוויות נגד

- פצעים מזוהמים, כוויות דרגה שלישית ופצעים עם חדירה לשרירים, לגידים או לעצמות

מק"ט					תאור פריט		
שאל	לאומית	כללית	מכבי	יצרן	מס' יח.	מידות	פריט
				900947	10	5 x 5 ס"מ	Hydrocoll® 3
3100213217				900948	10	7.5 x 7.5 ס"מ	
3100213224	1000134486	12525	12525	900938	10	10 x 10 ס"מ	
3100213231	1000134487	12526		900939	10	15 x 15 ס"מ	
3100213238	1000134488	12527		900940	10	20 x 20 ס"מ	
3100213259				900953	10	5 x 5 ס"מ	Hydrocoll® 3 Thin
3100213266				900954	10	7.5 x 7.5 ס"מ	
3100213273	12533	1000134489	12533	12533	900942	10 x 10 ס"מ	
3100213280	12534	1000134530	12534	900943	10	15 x 15 ס"מ	
			12529	900945	10	18 x 18 ס"מ	
3100213245				900944	10	20 x 20 ס"מ	Hydrocoll® 3 Sacrum (לעצם הזנב)
3100213252				900946	10	13.5 x 15 ס"מ	Hydrocoll® 3 Concave (לקימורים)



# Sorbalgon®

## חבישת אצות ים

### מרכיבי החבישה

- בד לא ארוג
- אצת ים (אלגינט)
- סידן (קלציום)

### מנגנון פעולה

- הפיכה לג'ל במגע עם הפרשות
- ספיחת חלקיקי תאים מתים והפרשות לתוך הג'ל
- אספקת לחות למיטת הפצע

### הוראות שימוש

- גזור את החבישה בהתאם לגודל הפצע
- החלף את החבישה בהתאם לכמות הפרשה, אך לא לפני שהפכה לג'ל
- השאר את קצה החבישה מעל פני העור בעת שימוש בתוך מחילות
- קבע את החבישה באמצעות חבישה משנית כגון Peha-haft LF או Omnifix E, Cosmopor

### יתרונות

- גמישות ורכות להתאמה מירבית למיטת הפצע
- ספיחה מהירה של הפרשות
- שמירת לחות במיטת הפצע
- החלפה ללא כאב וטראומה - החבישה אינה נדבקת לפצע
- עידוד מנגנון קרישת הדם

מק"ט					תאור פריט		
שאל	לאומית	כללית	מכבי	יצרן	מס' יח.	מידות	פריט
3100209729				999598	10	5 x 5 ס"מ	Sorbalgon®
3100209737	1170002153	5644		999595	10	10 x 10 ס"מ	
3100212541	1170002722	54469		999589	5	10 x 20 ס"מ	
3100209745	1170002188	5645		999592	5	30 ס"מ, 2 גרם	Sorbalgon® T (למחילות)



# HydroTac®

## חבישת ספוג עם הידרוג'ל

### מרכיבי החבישה

- פוליאורטן
- הידרוג'ל

### מונגנון פעולה

- ספיגת הפרשות
- אספקת לחות

### הוראות שימוש HydroTac®

- גזור את החבישה כך ששוליה יהיו גדולים בכ-2-1 ס"מ משולי הפצע
- הסר את יריעות סיליקון 1 ו-2 והצמד את הצד המרושת אל הפצע
- קבע את החבישה באמצעות חבישה משנית כגון Peha-haft LF או Omnifix E, Cosmopor
- החלף את החבישה לאחר שלושה ימים או כאשר ניצפות הפרשות הפצע בשוליה

### יתרונות

- הצמדה ("טאק") ראשונית לייצוב החבישה
- אספקת לחות מתמדת ובכמות המותאמת למצב הפצע
- ספיגה מהירה של הפרשות הפצע ואגירתן לאורך זמן (מונע מסרציה)
- שיחלוף גזים ומניעת זיהום נרכש
- החלפה ללא כאב וטראומה - החבישה אינה נדבקת לפצע

### התוויות

- פצעים אקוטיים וכרוניים
- פצעים בשלבי הגרונולציה והאפיתליזציה
- פצעים שטחיים


### הוראות שימוש HydroTac® Comfort

- הסר את יריעות סיליקון 1 ו-2 והצמד את הצד המרושת אל הפצע
- הסר את יריעות סיליקון 3 ו-4
- החלף את החבישה לאחר שלושה ימים או כאשר ניצפות הפרשות הפצע בשוליה

מק"ט				תאור פריט		
שאל	לאומית	כללית	מכבי	מאוחדת	יצרן	פריט
			685849			6 ס"מ (קוטר) 10
3109903963			14071	14071	685832	10 x 10 ס"מ 10
			14091		685833	10 x 20 ס"מ 3
			685844		685844	20 x 20 ס"מ 3
			685810		685810	8 x 8 ס"מ 10
			14095		685815	12.5 x 12.5 ס"מ 10
			685820		685820	15 x 20 ס"מ 3
			685822		685822	20 x 20 ס"מ 3

HydroTac®

HydroTac® Comfort  
(בעלת שוליים דביקים)

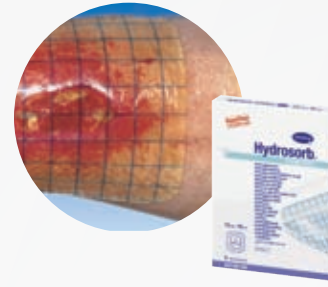

# HydroSorb®

## חבישת ג'ל

### מרכיבי החבישה

- הידרוג'ל
- פוליאורטן

### מונגנון פעולה

- ספיגת הפרשות וכליאתן
- יצירת סביבה לחה

### הוראות שימוש

- הנח את החבישה על מיטת הפצע
- קבע את החבישה באמצעות חבישה משנית כגון Peha-haft LF או Omnifix E, Cosmopor
- החלף את החבישה אחת ל-3-7 ימים או בהתאם לצורך
- קור את החבישה בהתאם לצורך

### התוויות

- פצעים כרוניים בשלבי גרונולציה ואפיתליזציה
- פצעי לחץ וכוויות - עד דרגה 2, ללא הפרשה מרובה
- לאחר עצירת דימום באיזור תורם
- אודם באזור הקרנות

### יתרונות

- לשימוש רציף, עד 7 ימים
- לחלוח הפצע
- הגנה מכנית ובקטריאלית
- היפואלרגניות
- שקיפות להערכת מצב הפצע ללא הסרת החבישה
- החלפה ללא כאב וטראומה - החבישה אינה נדבקת לפצע
- קירור והרגעת איזור הפצע
- אפשרות לתיעוד גבולות הפצע על גבי החבישה

מק"ט				תאור פריט		
שאל	לאומית	כללית	מכבי	מאוחדת	יצרן	פריט
3100209562					900853	5 x 7.5 ס"מ 5
3100209570		1170002137	68681		900854	10 x 10 ס"מ 5
3100209588					900855	20 x 20 ס"מ 3
3100209620					900706	7.5 x 10 ס"מ 5
3100209638					900723	12.5 x 12.5 ס"מ 5
3100214134					900729	21.5 x 24 ס"מ 3

HydroSorb®

HydroSorb® Comfort  
(בעלת שוליים דביקים)



## Proxigel® חבישת ספוג עם סיליקון

### מרכיבי החבישה

- יריעה אחורית תומכת
- ליבה סופר סופגת
- שכבה בלתי ארוגה
- ספוג פוליאוריטן
- יריעת סיליקון ראשונית

### מנגנון פעולה

- ספיגת הפרשות במפל לחצים
- שמירה על סביבת פצע לחה

### הוראות שימוש Proxigel®

• החלף את החבישה בהתאם לכמות הפרשה, עד 5 ימים

### יתרונות

- ניהול הפרשות מעולה (קצב אידוי) וסביבת לחות אופטימלית לריפוי הפצע
- מניעת דליפת הפרשות ומזעור המסרציה
- עמידה במים, חדירה לאוויר וחוסם בפני חיידקים
- רמת הצמדות גבוהה מההדבקה הראשונה
- הדבקה עדינה למניעת כאב וטראומה
- מפחיתה ומפזרת מחדש את הלחץ על גבי המשטח
- נוחה וקלה לשימוש

### התוויות

- פצעים אקוטיים וכרוניים
- פצעים בשלבי הניקוי והגרונולציה
- פצעים מפרישים בכמות גדולה
- לתשומת לב: בפצעים מזוהמים יש לשלב עם טיפול מקומי בזיהום

מק"ט				תאור פריט		
שאל	לאומית	כללית	מכבי	מאוחדת	יצרן	פריט
					14100000	10 8x8 ס"מ
3109904634					14200000	10 10x10 ס"מ
3109904641					14300000	10 12.5x12.5 ס"מ
					14400000	5 15x15 ס"מ
					14500000	5 10x30 ס"מ
3109904648					14600000	קטן
3109904655					14700000	גדול
3109904662					14800000	לעקב



## PermaFoam® חבישת ספוג

### מרכיבי החבישה

- פוליאוריטן

### מנגנון פעולה

- ספיגת הפרשות במפל לחצים
- שמירה על סביבת פצע לחה

### הוראות שימוש PermaFoam®

- גזור את החבישה כך ששולייה יהיו גדולים בכ-2-1 ס"מ משולי הפצע
- קבע את החבישה באמצעות חבישה משנית כגון Peha-haft LF או Omnifix E, Cosmopor
- החלף את החבישה בהתאם לכמות הפרשה, עד 3 ימים

### יתרונות

- אגירת נוזלים גבוהה, שמירה על סביבה לחה והגנה מפני זיהום/טראומה
- ספיגה מהירה של הפרשות הפצע ואגירתן לאורך זמן (מונע מסרציה)
- החלפה ללא כאב וטראומה - החבישה אינה נדבקת למיטת הפצע
- ניתן להתקלח עם החבישה

### הוראות שימוש PermaFoam® Comfort

- החלף את החבישה בהתאם לכמות הפרשה, עד 3 ימים

### התוויות

- פצעים אקוטיים וכרוניים
- פצעים בשלבי הניקוי והגרונולציה
- פצעים מפרישים בכמות גדולה
- לתשומת לב: בפצעים מזוהמים יש לשלב עם טיפול מקומי בזיהום

מק"ט				תאור פריט		
שאל	לאומית	כללית	מכבי	מאוחדת	יצרן	פריט
3100213287			12551		409401	10 10x10 ס"מ
3100213294					409403	5 10x20 ס"מ
3100213301			1000054507		409405	5 15x15 ס"מ
3100213308			1000055051		409406	3 20x20 ס"מ
					409427	10 6 ס"מ (קוטר)
3100213315			1000055055	12556	409408	10 11x11 ס"מ
3100213329			1000055056		409412	5 15x15 ס"מ
3100213336			1000055057		409413	3 20x20 ס"מ
3100213616					409425	3 10x10 ס"מ
3100213609					409424	3 16.5x18 ס"מ
3100213602					409422	3 18x18 ס"מ
3100213623			12564		409426	10 8x8 ס"מ

PermaFoam®

PermaFoam® Comfort  
(בעלת שוליים דביקים)

PermaFoam® Cavity  
(למחילות)

PermaFoam® Concave  
(לקימורים)

PermaFoam® Sacral  
(לעצם הזנב)

PermaFoam® Tracheotomy  
(לאחר ניקוב קנה נשימה)





## Biopad® חבישת קולגן

**מרכיבי החבישה**  
• 100% קולגן טבעי הטורולוגי

**מנגנון פעולה**  
• אספקת חלבון לבניית סיבי קולגן

### הוראות שימוש

- וודא כי הפצע נקי, אינו מזוהם או נקרטי
- גזור את החבישה בהתאם לגודל הפצע והנח אותה על מיטת הפצע
- חבוש עם חבישה משנית. ניתן להשתמש גם בחבישת לחץ אלסטית
- בדוק את מצב החבישה לאחר 48 שעות. אם החבישה צמודה לפצע משמע כי חבישת הקולגן פעילה ותספג מעצמה. במידה והחבישה נספגה (24-72 שעות), יש להוסיף חבישה נוספת
- בעת דימום, הנח גזוזת על גבי החבישה ליצירת לחץ בינוני
- ניתן להרטיב את ה-Biopad®, בטרם השימוש, להגברת הגמישות

### יתרונות

- החבישה נספגת במלואה
- חסכון זמן בתהליך ריפוי הפצע
- הפחתת סיכוי לסיבוך כתוצאה מהפצע
- יצירת צלקת איכותית

### התוויות

- פצעים בשלבי הגרנולציה והאפיתליזציה
- עצירת דימומים קלים

### התוויות נגד

- פצע מזוהם או נקרטי, רקע של מחלות אוטו-אימוניות

מק"ט				תאור פריט		
מכבי	כללית	לאומית	שראל	פריט	מידות	מס' יח.
68689	1000052778		3100213672	Biopad®	5x5 ס"מ	3
	1000099626	22884			10x10 ס"מ	1
	1000099627	22885			10x10 ס"מ	1
	1000099628	23040			15x10 ס"מ	1



## Proximel Ag® חבישת ספוג עם סיליקון ויוני כסף

### מרכיבי החבישה

- יריעה אחורית תומכת
- ליבה סופר סופגת
- שכבה בלתי ארוגה
- ספוג פוליאוריטן
- יריעת סיליקון ראשונית
- יוני כסף בשחרור מושהה ברזיכוז של 25-35 מ"ג/ס"מ<sup>2</sup>

### מנגנון פעולה

- שפעול בסביבה לחה של יוני כסף - פגיעה במנגנון החלוקה של החיידק ע"י הצמודות יוני הכסף לממברנה שלו.

### הוראות שימוש Proximel Ag®

- הנח את החבישה על הפצע. החלף את החבישה אחת ל-5-7 ימים.

### יתרונות

- יוני כסף בשחרור מושהה עד 7 ימים
- אפקט אנטיביוטי רחב לזירוז זמן ההחלמה
- הפחתת מס' מושבות חיידקים בחבישה
- ניהול הפרשות מעולה (קצב אידוי) וסביבת לחות אופטימלית לריפוי הפצע
- מניעת דליפת הפרשות ומזעור המסרציה
- עמידה במים, חדירה לאוויר וחסם בפני חיידקים
- רמת הצמודות גבוהה מההדבקה הראשונה
- הדבקה עדינה למניעת כאב וטראומה
- מפחיתה ומפזרת מחדש את הלחץ על גבי המשטח
- נוחה וקלה לשימוש

### התוויות

- פצעים מזוהמים ומפרישים

מק"ט				תאור פריט		
מכבי	כללית	לאומית	שראל	פריט	מידות	מס' יח.
				Proximel Ag®	8x8 ס"מ	10
					10x10 ס"מ	10
					15x15 ס"מ	5
					10x30 ס"מ	5
					קטן	5

לעצם הזנב



## Grassolind® חבישת גזה שומנית

### מרכיבי החבישה

- 100% כותנה
- ואזלין, פראפין וואקס (שעווה)

### מנגנון פעולה

- אידיי הפרשות הפצע
- אספקת מרכיבים שומניים לרקמה הנבנית

### הוראות שימוש

- גזור את החבישה בהתאם לגודל הפצע והנח אותה על מיטת הפצע
- קבע את החבישה באמצעות חבישה משנית כגון Peha-haft LF או Omnifix E, Cosmopor
- החלף את החבישה בהתאם לכמות הפרשה, עד 3 ימים

### יתרונות

- עידוד גרונולציה ואפיתליזציה
- שמירה על לחות הפצע
- שיחלוף גזים
- התאמה אידיאלית למטופלים בעלי עור רגיש או לבעלי רגישויות
- חציצה בין הפצע לחבישה סופגת או סוגרת
- החלפה ללא כאב וטראומה - החבישה אינה נדבקת לפצע
- מבנה רשת עם חריצים גדולים במיוחד

### התוויות

- פצעים אקוטיים וקרוניים בשלבי הגרונולציה והאפיתליזציה
- פצעים בהם חשוב למנוע את הדבקות החבישה אליהם (כגון כוויות, שפשופים, לאחר הקרנות או עקירת ציפורן חודרנית, אזור מושתל ותורם)

מק"ט		תאור פריט			פריט	Grassolind®
מדינה	מכבי	מאוחדת	יצרן	מס' יח.		
3109902282	5612		499350	50	5 x 5 ס"מ	
3109902316	1170075320	5614	499314	10	10 x 10 ס"מ	
3109902324	1170075304	5615	499336	30	10 x 20 ס"מ	
			499315	30	20 x 20 ס"מ	



HydroTherapy  
Efficacy. And Simplicity.



**NEW!**  
And only from  
HARTMANN

Efficient wound healing begins  
with effective wound cleansing.

HydroTac®





## Hydrofilm® חבישת הגנה וקיבוע

### מרכיבי החבישה

- פוליאורטן
- סיבי ויסקוזה ופוליאיתילן (בדגם Hydrofilm Plus)
- הכולל פד סופג)

### מנגנון פעולה

- הגנה מפני זיהום נרכש ולחות מן החוץ
- אידידו מים ומעבר גזים מן הפצע אל החוץ

### הוראות שימוש

- גלח את אזור הפצע להדבקה יעילה
- גזור את החבישה כך ששוליה יהיו גדולים בכ-2-3 ס"מ משולי הפצע
- הסר את יריעות 1 ו-2 מן החבישה והדבק על הפצע
- הסר את יריעות 3 ו-4 מגב החבישה
- החלף בהתאם לצורך

### יתרונות

- אינה חדירה למעבר חיידקים ומים
- מאפשרת אידידו הפרשות וכניסת חמצן אל מיטת הפצע
- היפואלרגנית, שקופה וגמישה
- בעלת כושר הדבקות גבוה
- ניתן להתקלח עם החבישה

### התוויות

- חבישה ראשונית להגנה וכיסוי פצעים שאינם מפרישי כגון צלקת צעירה או חתך ניתוחי
- חבישה משנית לקיבוע חבישות נוספות

מק"ט				תאור פריט		
מדינה	מכבי	כללית	לאומית	יצרן	מאחדת	פריט
86904				685760		פריט
86896				685764		פריט
86899				685756		פריט
				685759		פריט

Hydrofilm®



## V.A.C Therapy®

### הטכנולוגיה המובילה לטיפול ביתי בפצע במסגרת סל הבריאות

טכנולוגיית ה- Vacuum Assisted Closure (V.A.C Therapy®) היא טכנולוגיה אקטיבית, לא פולשנית, המקדמת ריפוי של פצעים אקוטיים וכרוניים (פצעים קשי-ריפוי כגון פצעי ניתוח, פצעי לחץ, כיבים ברגל סוכרתית, תאונות ועוד), מקצרת משמעותית את משך האיטופוז ומאפשרת טיפול ביתי בפצעים קשים ומורכבים בבטיחות וביעילות גבוהה. לטכנולוגיה הוכחות מדעיות מבוססות הנשענות על אלפי מחקרים ופרסומים רפואיים.

**חברת כמיטק מייצגת בלעדית את חברת KCI בישראל, מפעילה צוות אחים ואחיות מקצועיים ובעלי נסיון רב המעניקים טיפול ביתי למטופל, כולל הדרכה ותמיכה 24/7, בשימוש במכשיר חדיש ומתקדם המאפשר נידודת וגמישות למטופל.**



# Omnifix® E

תחבושת דביקה לקיבוע חבישות וציוד רפואי אחר

### מרכיבי החבישה

- פוליאסטר לא ארוג
- דבק על בסיס גומי סינתטי

### הוראות שימוש

- גלח את אזור הפצע להדבקה יעילה
- התאם את גודל החבישה כך שמרחק שולי החבישה משולי הפצע יהיה 2-3 ס"מ
- הסר את היריעות המייצבות מן החבישה והדבק אותה מעל הפצע
- החלף את החבישה בהתאם לצורך

### יתרונות

- היפואלרגנית
- אלסטית ואינה מגבילה את התנועה
- חדירה למים ואוויר
- אינה גורמת למסרציה
- הדבקה פשוטה
- החלפה ללא כאב וטראומה - החבישה אינה נדבקת לפצע
- ניתנת לשימוש בעת הדמיית רנטגן
- אינה מושפעת משינויי טמפרטורה
- בעלת חיתוך גלי מוכן מראש

### התוויות

- לקיבוע חבישות על המפרקים ואיברים בעלי אנטומיה מעוגלת או זוויתית
- לקיבוע ציוד רפואי על העור, כגון צינורות וחיישנים

מק"ט			תאור פריט			פריט
שאל	לאומית	כללית	מכבי	מאוחדת	יצרן	
						Omnifix® E
					900649	
					900650	
					900651	
					900652	



# Cosmopor® E

פד דביק להגנה וקיבוע

### מרכיבי החבישה

- 100% ויסקוזה
- דבק פוליאקרילט

### מנגנון פעולה

- ספיגת ההפרשות מן הפצע
- הקטנת חשיפת מיטת הפצע להפרשות
- הגנה מפני זיהום נרכש ולחות מן החוץ
- אידיוי מים ומעבר גזים מן הפצע אל החוץ

### הוראות שימוש

- גלח את אזור הפצע
- התאם את גודל החבישה כך שמרחק שולי החבישה משולי הפצע יהיה 2-3 ס"מ
- הסר את היריעות המגונות מהחבישה והדבק אותה מעל הפצע
- החלף את החבישה בהתאם לצורך

### יתרונות

- היפואלרגנית - ללא לטקס, חומרים על בסיס שרף גמישה
- בעלת פינות מעוגלות למוניעת הינתקות החבישה מהעור
- החלפה ללא כאב וטראומה - החבישה אינה נדבקת לפצע

**התוויות**

- חבישה ראשונית להגנה וכיסוי פצעים מפרשיים בכמות מעטה
- חבישה משנית להגנה על פצעי ניתוח ולקיבוע חבישות נוספות

מק"ט				תאור פריט			פריט
שאל	לאומית	כללית	מכבי	מאוחדת	יצרן	מס' יח.	
							Cosmopor® E
					900870	50	
					900871	25	
					900872	25	
					900873	25	
					900874	25	
					900875	25	
					900876	25	
					900877	25	
					900878	25	





# Safix® Plus

## אגד גבס מהיר התייבשות

### מרכיבי החבישה

- בסיס: גליל גזת כותנה מולבנת 17 חוטים.
- ציפוי: גבס PoP טבעי (Calcium sulphate hemihydrates) וחומרים קושרים.

### הוראות שימוש

- רפד את כל האיזור העתיד להיות מגובס עם ריפוד כמקובל.
- טבול את אגד הגבס במלואו בתוך אמבט מים קרים במשך כ-3-5 שניות, עד אשר הגבס יהיה רטוב כולו, ללא בועות אוויר.
- הוצא את הגבס מאמבט המים וסחוט ממנו את עודפי המים. הגבס ייראה בצבע לבן-צהבהב.
- הנח את הגבס מבלי להפעיל לחץ למתיחה.
- עצב את הגבס - לרשותך 3 דקות לעיצוב.
- הגבס יתקשה בתוך כ-4-5 דקות.
- ניתן להפעיל עומס על הגבס בתוך כ-24 שעות.
- הסרה: ניתן להסיר את הגבס באמצעים רגילים כגון מספריי גבס או מסור.
- מיגון: בעת הסרת הגבס במסור יש להשתמש במסכת אבק ובמשקפי מגן. במקרה של מגע ממושך עם הידיים - יש לעטות כפפות.
- איחסון: לפחות שלוש שנים. במקום יבש, מאוורר, בטמפרטורת החדר והרחק ממקור אור חזק.

### יתרונות

- קל משקל
- מהיר התייבשות
- שוליים גליים
- פליטת חום- עד 36°C בלבד.

### התוויות

- לקיבוע חיצוני של הגפה

מק"ט				תאור פריט		
שאל	לאומית	כללית	מכבי	מאוחדת	יצרן	פריט
3101205826	20001358	1000057117			332730	2.7 מ'x 6 ס"מ 28x2
3101205833	20001359	1000057118	1041514	1041514	332731	2.7 מ'x 8 ס"מ 15x2
3101205840	20001360	1000057119	1041515	1041515	332732	2.7 מ'x 10 ס"מ 12x2
3101205847	20001361	1000057120			332733	2.7 מ'x 12 ס"מ 10x2
3101205854	20001362	1000057121	1041516	1041516	332734	2.7 מ'x 15 ס"מ 8x2
3101205861	20001363	1000057122	1041517	1041517	332735	2.7 מ'x 20 ס"מ 6x2

Safix® Plus



# Varolast® Plus

## תחבושת לחץ דביקה

### מרכיבי החבישה

- כותנה
- פוליאמיד
- דבק אבץ

### הוראות שימוש

- מצב את הרגל בזווית ישרה יחסית לשוק
- לפף את התחבושת מסביב לרגל תוך הפעלת מתיחה קבועה - להשגת לחץ אחיד
- כסה את התחבושת באמצעות שרוולית כגון Stulpa®
- התהלך מייד-לאיזון בין לחץ התחבושת לפעילות השרירים
- החלף את התחבושת עם התרופפותה

### יתרונות

- לחה במיוחד
- מוכנה לשימוש
- אלסטית לאורכה
- הנחה אחידה
- התאמה לקווי מתאר הגוף
- ללא צורך בגזירה
- ידידותית לעור

מק"ט				תאור פריט		
שאל	לאומית	כללית	מכבי	מאוחדת	יצרן	פריט
					931582	5x8 ס"מ 1
					931583	7x10 ס"מ 1
					931585	10x10 ס"מ 1

Varolast® Plus



## Omniplast® טייפ קיבוע

### מרכיבי החבישה

- ויסקוזה
- דבק סינתטי על בסיס גומי

### הוראות שימוש

- חתוך והדבק לפי הצורך

### יתרונות

- היפואלרגנית
- חדירה למים ואוויר
- הדבקה מהימנה
- חזקה במיוחד
- החלפה ללא כאב וטראומה
- חיתוך קל ופשוט

### התוויות

- לקיבוע חבישות, צינוריות וחיישנים למטופלים עם עור רגיל

מק"ט					תאור פריט			
שאל	לאומית	כללית	מכבי	מאוחדת	יצרן	מס' יח.	מידות	פריט
					900452	1	9.1 x 1.25 מ'	Omniplast®
					900453	1	9.1 x 2.50 מ'	
					900454	1	10 x 5.00 מ'	



## Omnitape® תחבושת דביקה לקיבוע מפרקים

### מרכיבי החבישה

- ויסקוזה
- אבץ חמצני

### הוראות שימוש

- לפף את התחבושת מסביב לאיבר המטרה
- הקפד לא להפעיל לחץ רב מדי

### יתרונות

- נדבקת בקלות גם לטקסטיל ולתחבושות לחץ
- בעלת שולי זיגזג המקלים על חיתוכה לאורך ולרוחב

### התוויות

- לקיבוע מפרקים ולטיפול שמרני בנקעים
- לתמיכה והקלה בפציעות שריר
- למניעה ושיקום מפציעות ספורט

מק"ט					תאור פריט				
שאל	לאומית	כללית	מכבי	מאוחדת	יצרן	מס' יח.	מידות	פריט	
					3100207590	88087	500059	1	10 x 3.75 מ'
					3100207608		500060	1	5 x 10 מ'

Omnitape®



# משחה מהפכנית לטיפול בפצעים קשיי ריפוי וכוויות

- ✓ מכיל חומצות אמינו ושעוות טבעיות ✓ מתאים לכל סוגי הפצעים
- ✓ מקצר את תהליך הריפוי ✓ מפחית תחושת כאב ✓ בשילוב עם חבישות מתקדמות



## Peha-haft® Latex Free תחבושת קיבוע אלסטית

### מרכיבי התבישה

- ויסקוזה
- כותנה
- פוליאמיד

### הוראות שימוש

- לפף את התחבושת מסביב לאיבר המטרה, תוך כדי הפעלת לחץ מתאים

### יתרונות

- היפואלרגנית - ללא לטקס ואקרילט
- נדבקת לעצמה
- נצמדת היטב גם לחלקי גוף עם אנטומיה מורכבת לחבישה
- אין צורך בקיבוע נוסף
- חסכון בעלויות הודות לצריכה נמוכה של החומר

### התוויות

- תחבושת משנית לקיבוע מפרקים, איברים בעלי קווי מתאר מעוגלים, קיבוע חבישות, צינוריות וכדומה

מק"ט				תאור פריט			
ישראל	לאומית	כללית	מכבי	מאוחדת	מס' יח.	מידות	פריט
3100216851		1000093319		932446	1	4 ס"מ x 20 מ'	
3100216858		1000093490		932447	1	6 ס"מ x 20 מ'	
3100216865		1000093491	1050143	932448	1	8 ס"מ x 20 מ'	
3100216872		1000093492		932449	1	10 ס"מ x 20 מ'	
3100216879		1000093493		932450	1	12 ס"מ x 20 מ'	

Peha-haft® LF

# Dermaden®

קרם יחודי לטיפול בפצעים/פגעי עור וכוויות



## מרכיבי החבישה

- קרם דרמדן עשוי ממרכיבים טבעיים בלבד
- Purified Water, Bees wax, Carnuba wax

## מנגנון פעולה

- מהווה מחסום פיזיולוגי בררני על גבי הפצע שיוצר לפצע סביבה אופטימלית להחלמה
- מבודד את הפצע מהסביבה החיצונית. יוצר סביבה אנטימיקרוביאלית, השומרת על לחות, ומושכת נוזלים טוקסיים מחוץ למיטת הפצע. איזון החומציות.

## הוראות שימוש

- נקה את הפצע במים זורמים בטמפ' חדר (25-30 מע')
- ייבש הפצע בעזרת גזה רכה
- מרח הקרם על כל שטח הפצע, כולל שולי הפצע
- בפצעים עמוקים: מלא עם הקרם בכל החללים של הפצע
- השימוש בדרמדן מומלץ 2-3 פעמים ביום ועד לפעם ביום בהתאם להתקדמות הפצע
- לאחר מריחת הקרם, יש לכסות את הפצע בחבישה אוורירית

## יתרונות

- עשויה ממרכיבים טבעיים בלבד
- מנטרלת ומגנה מפני חיידקים
- שומרת על ניקיון הפצע ועל סביבה לחה
- מפחיתה כאב באופן מהיר
- מזרזת החלמה מהירה ומגנה על שולי הפצע
- בטוחה לשימוש ואינה דורשת מרשם רופא

## התוויות

- פצעי לחץ
- פצעים סוכרתיים
- כוויות
- כיבים

## התוויות נגד

- ילדים מתחת לגיל 6 (לא נבדק)
- פצעים מומאיים



## כמיטק-ציוד רפואי לשיפור איכות החיים

• מוצרי ספיגה למבוגרים • עזרים לגיל השלישי • ציוד לשיקום וניידות • תותבות ומכשירים • טיפול בפצעים קשיי ריפוי • חבישה רפואית טיפולית • ציוד למעבדות • ציוד כירורגי ואספקה סטרילית

למידע נוסף והזמנות, צרו קשר בטלפון 09-7620000



מק"ט				תאור פריט				
שאל	לאומית	כללית	מכבי	מאוחזת	יצרן	מס' יח.	מידות	פריט
3109904583					AGS210983	1	40 מ"ל	
3109904582					AGS210984	1	100 מ"ל	
3109904586					AGS210985	1	1000 מ"ל	

Dermaden®





הצוות המקצועי שלנו ישמח לעמוד לשירותך

מכירות קהילה 054-4540967

אזור הצפון 052-4760088

אזור שרון-שומרון 052-2421119

אזור המרכז 054-4540324

אזור ירושלים והדרום 050-4540008

שרות לקוחות 09-7620000